



CONTROL DE HEMORRAGIAS BAJO CONDICIONES CRÍTICAS


CELOX - A

Los gránulos de **CELOX™** en un dispensador que permite colocar el agente hemostático en forma rápida y simple al origen de la hemorragia en heridas penetrantes profundas.

CELOX™ es el agente hemostático mejor evaluado en el mercado mundial, **ACTÚA BAJO CONDICIONES DE HIPOTERMIA O ANTE LA PRESENCIA DE ANTICOAGULANTES**; no genera calor y no tiene efectos secundarios. Autorizado por la FDA, CoTCCC, clase 3CE y OTAN.

Esta aplicación fue desarrollada para atender heridas penetrantes angostas como son las ocasionadas por disparos, armas blancas, metralla y similares.

Según estudios independientes **CELOX - A** es el hemostático con la mayor tasa de supervivencia en heridas penetrantes profundas.

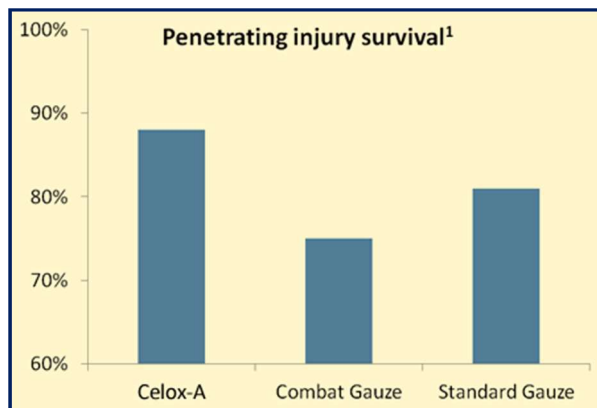



CONTROL DE HEMORRAGIAS BAJO CONDICIONES CRÍTICAS

COMO UTILIZAR CELOX - A

1. Colóquese guantes para su protección.
2. Abra el paquete, utilizando uno de los pre-picados que este trae.
3. Arme el dispensador, para lo cual retire su tapón e introduzca el embolo.
4. Retire la tapa azul del dispensador.
5. Inserte el dispensador lo más profundo que pueda en la herida, llegando al origen del sangramiento.
6. Empuje lentamente el émbolo, una vez aplicado el producto retírelo lentamente.
7. Cubra la herida con una gasa y ejerza presión por 3 minutos.
8. Levante la mano lentamente y observe si el sangramiento se detuvo; si este persiste ejerza presión por 3 minutos más, eventualmente puede requerir usar un segundo aplicador.
9. Coloque un vendaje de compresión sobre la herida y vende fuertemente para mantener **CELOX™** en posición.
10. Traslade a un centro asistencial y muestre al médico el envase de **CELOX-A**.
11. Cualquier resto de **CELOX™** no utilizado debe ser desechado.



Videos demostrativos:

- <https://www.youtube.com/watch?v=dNN50YdK8cA&feature=youtu.be>