



CONTROL DE HEMORRAGIAS BAJO CONDICIONES CRÍTICAS

CELOX - GRANULAR

Hemostático en gránulos para el tratamiento de heridas hemorrágicas moderadas o severas; de especial utilidad en el tratamiento de heridas de superficie irregular, erosiones amplias y laceraciones; además de heridas profundas por armas de fuego, cortes y similares.

Los gránulos **CELOX™** poseen una gran superficie, los cuales absorben el líquido de la sangre, se hinchan gelificándose y forman un robusto "pseudo coagulo" que se adhiere a la herida sellándola y controlando rápidamente el sangrado.



CELOX™ actúa independientemente de los procesos normales de coagulación del cuerpo. **CELOX™** actúa bajo condiciones de hipotermia o ante la presencia de anticoagulantes; no genera calor. Autorizado por la FDA, CoTCCC, clase 3CE (norma europea) y OTAN.

Disponible en sobres de 35, 15 y 2 gramos de **CELOX™**.

Su uso es muy simple:

1. Colóquese guantes.
2. Abra el sobre de **CELOX™**.
3. Si es posible retire el exceso de sangre en la herida.
4. Vierta los gránulos de **CELOX™** sobre la herida y ejerza compresión con una gasa (o la mano si no posee otra opción) por tres minutos.
5. Lentamente deje de hacer presión y observe si se detuvo el sangramiento; si este persiste nuevamente ejerza presión por tres minutos.
6. En algunas circunstancias puede ser necesario verter más **CELOX™**, sin retirar el existente y repetir el proceso.
7. Si el sangramiento ha cesado.
8. Coloque un vendaje de compresión sobre la herida y vende fuertemente para mantener **CELOX™** en posición.
9. Traslade a un centro asistencial y muestre al médico el envase de **CELOX™**.

Video demostrativo: <https://www.youtube.com/watch?v=H2KklSr1IQE>

EL AGENTE HEMOSTÁTICO GRANULAR MÁS EFECTIVO DEL MERCADO.

