



# CONTROL DE HEMORRAGIAS BAJO CONDICIONES CRÍTICAS

## CELOX – NOOSE BLEED

Gasa hemostática para el control de hemorragias nasales.

Los gránulos de **Celox** altamente eficaces, utilizados para primeros auxilios de emergencia, ahora en una gasa para proporcionar una manera eficaz de controlar cualquier tipo de sangrado de nariz.

Forma de utilizar:

1. Abra el sobre y retire la gasa.
2. Doble la gasa e insértela verticalmente en la fosa nasal que sangra.
3. Ejercer presión por un par de minutos (2-3) sobre la fosa nasal que sangra.
4. Si el sangramiento continúa aplique presión por tres minutos adicionales y de requerirse puede insertar una gasa más.
5. Luego de 30 minutos puede retirar la gasa tirándola lentamente; si desea puede humedecerla con agua o suero salino.
6. Si el sangramiento continúa consulte con un médico, e informe del uso de CELOX.



Producto autorizado por la FDA.

**Producto ideal para deportistas de contacto o deportes extremos, igualmente para mantener en el hogar para atender sangramiento de narices en niños.**